

Lietošanas instrukcija: OPTERGO OPTISKIE ERGONOMISKIE RISINĀJUMI


- *Optergo ProSpec™* brilles
- *Optergo PrismSpec™* brilles
- *Optergo Ultralight™* paceļamās lupas
- *Optergo Ultralight™* iebūvētās lupas
- *Optergo VinKep™* lupas
- *Optergo KepLite™* lupas

Pateicamies par uzticēšanos mums un apsveicam ar izvēli.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet turpmāk sniegto informāciju.

SIMBOLI

Turpmāk ir norādīti simboli (ja tādi ir), kas ir redzami uz medicīniskās ierīces etiķetes.

 Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm.



PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Brilles, kuras veido:

- rāmis;
- briļļu lēcas, prizmas lēcas vai nesošās lēcas;
- pēc izvēles ar iebūvētu vai paceļamu lupu;

paredzētas uzstādīšanai medicīnas speciālistiem un neprofesionāļiem, lai nodrošinātu palielinājumu (ja ir iekļautas lupas), redzes asumu un ergonomiski uzlabotu darba stāvokli.

IERĪCES, KURAS VAR IZMANTOT KOPĀ

Ierīci var ērti piestiprināt visiem *Optergo* apgaismojuma sistēmu modeļiem.

SPECIFIKĀCIJA

Risinājums	Rāmis	Optiskās sistēmas veids	Nesošās lēcas	Darba attālums	Piederumi
<i>Optergo ProSpec™</i>	B4 Izmēri M, L, XL	Darba brilles	Bez optikas, monofokālās, bifokālās, progresīvās lēcas	100% pielāgojama (30–80 cm)	Futrālis Silikona siksnīņa Sānu aizsegi (pēc izvēles)
<i>Optergo PrismSpec™</i>	B4 Izmēri M, L, XL	Prizmas brilles			
<i>Optergo Ultralight™</i> paceļamās	B4 Izmēri M, L, XL	Galileja paceļamās			
<i>Optergo Ultralight™</i> iebūvētās	B4 Izmēri M, L, XL	Galileja			
<i>Optergo VinKep™</i>	B4 Izmēri M, L, XL	Prizmatiskas, <i>Pentarooft</i> prizma			
<i>Optergo KepLite™</i>	B4 Izmēri M, L, XL	Prizmatiskas, taisnas			


EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJA: *Optergo Ultralight™* paceļamās brillēs

Pacelšanas funkcija

Lietošanas laikā lupas konusi ir jānolaiž uz leju tā, lai tie pieskartos brillu lēcām vai rāmja malai.


Pacelšana un nolaišana

Strādājot ar lupām, darba laikā pieskarieties tikai viegli tīrāmajam satvēriena punktam (metāla konstrukcijas vidusdaļā), kad tās paceļat vai nolaižat.

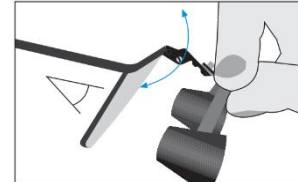

Enģes berzes regulēšana

Pareizs spriegojums tiek panākts, ja lupas paliek savā vietā gan paceltā, gan nolaistā pozīcijā. Regulēšanai izmantojiet pievienoto skrūvgriezi. Nepievelciet pārāk spēcīgi.

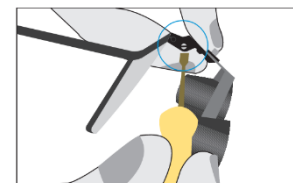

Lupu piestiprināšana un noņemšana


Lupas var piestiprināt un noņemt no brillēm tikai tad, ja tās ir pagrieztas vertikālā stāvoklī.

Piestiprināšana

Atbalstiet montāžas galviņu no apakšas ar pirkstu. Iespēju robežās iespiediet enģi taisni uz leju tās asī.

Noņemšana

Attiecīgi pavelciet enģi uz augšu.

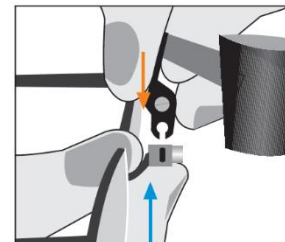

KONTRINDIKĀCIJAS

Kontrindikācijas nav konstatētas.



BRĪDINĀJUMI

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet turpmāk minētos brīdinājumus.

Pārlicinieties, ka ierīce ir piemērota paredzētajam lietojumam.

Pirms lietošanas notīriet ierīci.

Ņemiet vērā norādījumus, kas ir sniegti sadaļā "Apkope", lai nepieļautu detaļu atskrūvēšanos.

Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta, un sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

Izmantojiet tikai komplektācijā iekļautās daļas.

Pārlicinieties, ka aizsegi (ja ir iekļauti) ir pareizi uzstādīti, pretējā gadījumā pārtrauciet notiekošo procedūru.

Nebojājiet un nedemontējiet nevienu no sistēmas komponentiem.

Nemēģiniet veikt remontdarbus.

Ja rodas darbības traucējumi, pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

Nepieļaujiet saskari ar karstuma un aukstuma avotiem vai atklātu liesmu.

Lai nepieļautu acu bojājumus, neskatieties tieši gaismas avotos.

Lietojot ierīci, neveiciet pēkšņas galvas kustības.

Nestaigājiet ar uzliktu ierīci.

Nenēsājiet ierīci virs galvassegas.

Ja nepieciešams, lai noturētu ierīci vietā, izmantojiet komplektā iekļauto silikona siksnīņu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Lietojot ierīci pirmo reizi, visus komponentu regulēšanas un uzstādīšanas norādījumus skatiet šajā dokumentā

sniegtajā informācijā.

Ja ierīci nelietojat, glabājiet to futrālī.

NEVĒLAMĀS IETEKMES

Nav konstatēta nevēlama ietekme.

PIEGĀDES REŽĪMS

Šī ierīce netiek piegādāta sterila. Šī nav vienreizlietojama ierīce.

UZGLABĀŠANA UN/VAI LIETOŠANA

Uzglabājiet ierīci temperatūrā un mitrumā, kā ir norādīts sadaļā "Tehniskā specifikācija".

Ja ierīce netiek lietota, notīrītu ierīci uzglabājiet tās oriģinālajā iepakojumā.

Ar ierīci ir jārikojas, stingri turot to aiz kājiņām vai rāmja.

APKOPE

Regulāro apkopi veido ierīces tīrīšana, kā ir aprakstīts sadaļā "Tīrīšanas instrukcija", un ikmēneša visu risinājuma vaļējo un kustīgo daļu pārbaude. Īpaši ir jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpievelk skrūves, kas tur nesošo lēcu (skatīt 1. attēlu), lai nepieļautu risku, ka lēca nejauši varētu izkrist.

Izmantojiet komplektācijā iekļauto *Uni* rīku.

Pirms lietošanas pārliedzieties, ka ierīces daļas ir pareizi uzstādītas un noregulētas. Ja nepieciešams, pievelciet eņģu skrūves, lai saglabātu rāmja stabilitāti.

Saglabājiet oriģinālo iepakojumu, kas ir nepieciešams atpakaļnosūtīšanai/apkalpošanai, un sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.



1. attēls

MĀCĪBAS UN LIETOŠANAS KVALIFIKĀCIJA

Lai nepieļautu nevēlamas darbības, ir ieteicams pierast pie risinājuma drošā vidē, līdz jūtaties droši tā lietošanā. Pievērsiet īpašu uzmanību darbībai, pārvietojot rīku darba vietā un no tās.

TĪRĪŠANA

Lēcas tīriet ar mikrošķiedras drānu.

Visas pārējās virsmas varat notīrīt ar mīkstu drānu, kas ir samērcēta maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.

Netīriet ultraskaņas vannā.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķīdumos.

DEZINFEKCIJA

Vispiemērotākā līdzekļa un dezinfekcijas metodes izvēle ir atkarīga no piesārņojuma veida, un lietotājam tā ir jāizvēlas, novērtējot konkrēto risku darba vietā.

Lai pareizi izvēlētos dezinfekcijas līdzekļus, kas ir saderīgi ar šāda veida izstrādājumiem, iesakām apmeklēt ražotāja tīmekļvietni.

Laika gaitā šajos produktos var notikt izmaiņas, par kurām *Optergo* nav atbildīgs, tāpēc vienmēr iesakām pirms produkta lietošanas pārbaudīt tā aktīvās sastāvdaļas. Ņemiet vērā, ka cita veida dezinfekcijas līdzekļi ar

atšķirīgām aktīvajām sastāvdaļām var sabojāt produktu.

Pirms dezinfekcijas līdzekļa lietošanas vienmēr pārbaudiet ierīces integritāti. Vienmēr ņemiet vērā norādījumus, kas ir sniegti uz izmantotā dezinfekcijas līdzekļa etiķetes. Jebkurā gadījumā vienmēr ir svarīgi pēc iedarbības pilnībā notīrīt izmantoto līdzekli, lai nepieļautu tā uzkrāšanos uz ierīces, – laika gaitā tas var izraisīt ierīces degradāciju un/vai negaidītu bojājumu. Ja nepieciešams, notīriet šādus nosēdumus ar ūdenī samitrinātu drānu, beigās pilnībā nožāvējot, lai nepieļautu iespējamu šķidrums uzkrāšanos ierīces ģeometrijā. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

STERILIZĀCIJA

Ierīce netiek piegādāta sterila, un to nevar sterilizēt.

NORĀDĪJUMI PAR IZNĪCINĀŠANU

Ierīce nesatur toksiskus un bīstamus materiālus. Pirms iznīcināšanas dezinficējiet ierīci. Iznīcināšanas/likvidēšanas gadījumā neizmetiet ierīci dabā, ņemiet vērā attiecīgos valsts noteikumus.

VESELĪBAS RISKI

Veselības apdraudējums nav konstatēts.

INCIDENTI

Par jebkādiem nopietniem incidentiem saistībā ar ierīci ziņojiet ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvo lietotājs un/vai pacients.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ekspluatācijas apstākļi

Telpas gaisa temperatūra.....no 10 līdz 40 °C

Relatīvais gaisa mitrums.....no 10 līdz 90%

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Telpas gaisa temperatūra.....no -10 līdz +50 °C

Relatīvais gaisa mitrums.....no 10 līdz 90%

Uzglabāt sausā vietā, pasargātā no karstuma un aukstuma.

KLĪNISKĀS PRIEKŠROCĪBAS

Ņemot vērā, ka ierīce nodrošina lielāku redzes asumu (palielinājumu) un ar rāmja, stikla, papildu leņķa optikas un klienta, sniegto norādījumu palīdzību mazina operatora kakla pozīcijas leņķi, ierīce ļauj lietotājam lietošanas laikā saglabāt pareizu stāju, tādējādi nepieļaujot muskuļu un skeleta problēmu rašanos.

Nav nelabvēlīgas ietekmes uz klientu.

Optergo optiskie ergonomiskie risinājumi ir efektīvi un droši, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam mērķim.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Lai saņemtu tehnisko palīdzību: lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Info@optergo.com, vai zvaniet uz +46 31 887727.

Valodas, kas nav iekļautas šajā lietošanas instrukcijā, skatiet šajā saitē:

www.optergo.com/instructions.

PATĒRĒJAMIE KOMPONENTI

Ja jums ir nepieciešami ierīcei pievienojamie patērējamie komponenti, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļvietni www.optergo.com.



Optergo AB, Furuhällsvägen 1, 435 44, Mēlnlike, Zviedrija

14.04.2023. – PRP-REC-016, 1. red.