

myobrace®

MYOClean

puhastustabletid



MYOClean puhastustabletid

MYOClean antibakteriaalsed puhastustabletid hoiavad kaped ja teised suust eemaldatavad aparaadid hügieeniliselt puhtad ja eemaldavad plekid, jättes mündiselt värske maitse.

MYOClean tablettidega võib puhastada kõiki kapesid, samuti erinevaid suust eemaldatavaid ortodontilisi aparate ja proteese.

MYOClean on saadaval 24 tabletiga karbis; iga tablett on individuaalselt pakitud, säilitamaks selle antibakteriaalseid omadusi.

Soovitame kasutada MYOClean tablette kapede puhastamiseks vähemalt 2 korda nädalas.

MYOClean antibakteriaalsed puhastustabletid on toodetud ainult erialastele edasimüüjatele, võimaldamaks spetsialistil jälgida patsiendi kape puhastus rutiini.

MYOClean tablettide aktiivne koostisosa on kaaliumkaroaadi kolmekordne sool 35%.

Kasutusjuhend:

- 1 MYOClean tablett klaasi koos käesooja veega
- Aseta kape lahusesse ja jäta klaasi vähemalt 15 minutiks (võib jätta kauem)
- Eemalda kape klaasist, loputa jooksva vee all ja kuivata ning asetage tagasi karp

