

Optergo luupide kasutusjuhend



Meil on hea meel, et olete otsustanud kasutada *Optergo* luupe!

Enne kasutamist lugege palun läbi järgnev juhend, et teaksite, millega uusi luupe kasutades arvestama peaks.

Luubid

Uute luupide kasutamisel on oluline võtta **kohanemiseks 1- 2 nädalat**.

On oluline leida endale **sobiv töökaugus**, kus kuvatav pilt oleks kõige selgem. Liigutage end patsiendist lähemale ja kaugemale, et leida **optimaalne töökaugus**.

Puhastus & hooldus

Luupide puhastamiseks kasutage kaasasolevat **mikrokiudlappi**.

Luubi- ja prilliklaase puhastage **alkoholivaba või madala alkoholisisaldusega** vahendiga (kuni 70%).

Valgustuse juhtme kanderihma võib pesta käsitsi **kuni 40 kraadises vees**.

Specstrap kanderihma kasutamine on soovitatav, et tagada valgustusjuhtme pikem eluiga, kaitstes seda võimalike kahjustuste eest.

Valgustus ja aku

Enne esmakordset kasutamist laadige akut **3h**. Järgnevate laadimiste jaoks piisab **1h**. Akut võib laadima jätta ka pikemaks ajaks, aku täitudes lõpeb laadimine automaatselt. **Roheline märgutuli** süttib aku laadimisel ning kustub selle lõppedes.

Aku kestvus on **kuni 10h**.

Kontrollige alati, et **valgus oleks fookuses**.

Veenduge, et kinnitate ja eemaldate lampi õigesti ning **ärge kasutage jõudu**.

Küsimuste korral võta meiega ühendust:

annabell.bubnis@medeq.ee / info@medeq.ee

+372 5693 5646 / +372 622 8111