



Froggymouth on esimene anoeetiline müofunktsionaalne abivahend, mis on välja töötatud keele asendi ja infantiilse neelamismustri korrigeerimiseks.

Froggymouth'i loojaks on dr Patrick Fellus (Paris- Debré haigla) Froggymouth vastab ISO 13485 standardile ning omab CE ja FDA sertifikaate. Toodetud Prantsusmaal.

KELLELE FROGGYMOOUTH MÕELDUD ON?

Froggymouth abivahendit võib atüüpilise neelamismustri korral kasutada alates 4. eluaastast.



Froggymouth.com



VÄIKE, KUID TÕHUS ABIVAHEND

ATÜÜPILISE NEELAMISMUSTRI KORRIGEERIMISEKS



KUIDAS FROGGYMOUTH TÖÖTAB?

Froggymouth võimaldab huultel neelamise ajal pingevabas asendis püsida. Huuled on neelamise ajal eraldatud, hoides nii ära infantiilse neelamise. Mõnenädalase Froggymouth'i kasutamise järel asendub infantiilne neelamine korrektse neelamisega. Samuti soodustab see ka ninahingamist.

Abivahendi kasutamisel ei kaasata neelamisse suu ringlihast, välistatud on negatiivne rõhk suuõõnes, mis paneb keele tegema rohkem translatoorseid liigutusi, ning tänu tikkeljätke-keeleluu lihase (musculus styloglossus) kokkutõmbele toimub neelamine õigesti.



AUTOMATISEERIMINE JA HILISEM JÄLGIMINE

Tagamaks, et õige neelamine muutuks automaatseks protsessiks, tuleb Froggymouth'i kandmist jätkata

15 MINUTIT PÄEVAS
IGA PÄEV.

KUIDAS JA KUI KAUA FROGGYMOUTH ABIVAHENDIT KASUTADA?

FROGGYMOUTH'I KASUTATAKSE 15 MINUTIT PÄEVAS TELIEREKRAANI EES

Sellisel viisil tähelepanu hajub, mis tagab abivahendi õige asetsemise huulte piirkonnas. See võimaldab mitte mõjutada närviteid, mis kontrollivad tahtlikke liigutusi ja vastupidi, mõjutada automatismi kontrollivaid närviteid.

NB! Raamatud ja tahvelarvutid vaatamiseks ei sobi, kuna pea ettepoole kallutamisel hakkab sülg tilkuma.



Froggymouth abivahendi kandmisjuhised määrab spetsialist olenevalt ravikuurist. Raskete hambumus-anomaaliatega korral võib tekkida vajadus eelnevale ortodontilisele hindamisele ja ravile.

Väiksemate deformatsioonide korral võib Froggymouth abivahendit kasutada ravi algusest peale. Froggymouth abivahendit võib kasutada samaaegselt breketite või alaineritega.

Froggymouth'i peamised kliinilised uuringud, mis viidi läbi Prantsusmaal Lille'i ülikoolis, näitavad:

80%-LIST EFEKTIIVSUST
10-NÄDALASE RAVI JOOKSUL.

