

froggymouth 

FroggyMouth — первый аноэтический (работающий бессознательно) миофункциональный аппарат, разработанный для коррекции положения языка и функции глотания.

Дизайн аппарата разработан Dr. Fellus в госпитале Роберта Дебре в Париже, Франция. Устройство произведено во Франции, соответствует ISO 13485 и сертифицировано CE и FDA.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН FROGGYMOUTH?

При атипичное глотание можно использовать миофункциональный аппарат Froggymouth с 4-летнего возраста.



Froggymouth.com

froggymouth 

ПЕРВЫЙ АНОЭТИЧЕСКИЙ МИОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ

КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЯЗЫКА
И ФУНКЦИИ ГЛОТАНИЯ



КАК РАБОТАЕТ FROGGYMOUTH?

FroggyMouth разобщает губы во время глотания, предотвращая инфантильное глотание. Пациент должен быстро внедрить новый процесс самостоятельно. За несколько недель FroggyMouth предотвращает атипичное глотание и замещает его новым типом (физиологическим типом глотания). Он также способствует носовому дыханию.

При использовании аппарата не происходит вовлечения круговой мышцы рта в акт глотания, исключается отрицательное давление в полости рта, что заставляет язык совершать больше поступательные движения, и благодаря сокращению шилоязычной мышцы глотание происходит правильно.



АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Чтобы правильное поведение при глотании стало автоматическим процессом прибор необходимо продолжать носить

15 МИНУТ В ДЕНЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

КАК И КАК ДОЛГО FROGGYMOUTH ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

FROGGYMOUTH ИСПОЛЬЗУЮТ **15 МИНУТ В ДЕНЬ** ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

FroggyMouth используется 15 минут в день перед телевизионным экраном. Таким образом внимание пациента будет отвлечено, что обеспечит правильное расположение аппарата в области губ.

Это делает возможным не затрагивать нейронные пути, которые управляют произвольными движениями, а наоборот, воздействовать на пути, управляющие автоматизмом.



Выбор правильного размера FroggyMouth влияет на эффективность устройства для пациента. При тяжелых зубных аномалиях может потребоваться предварительная ортодонтическая оценка и лечение.

FroggyMouth может быть использован с самого начала лечения при незначительных деформациях. FroggyMouth можно использовать одновременно с брекетами или капями.

Основные клинические исследования FroggyMouth, произведенные в Университете города Лилль, Франция, показывают

80% ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗА 10 НЕДЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ.

